

NEW!



# Masque Barrière DESS™

By Valsem Industries SAS™

UNIVERSEL ● RÉUTILISABLE ● ÉCONOMIQUE ● ÉCOLOGIQUE

## NOTICE D'UTILISATION AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.



### COMMENT PORTER LE MASQUE ?

#### Avant de le mettre :

- 01.** Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- 02.** Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
- 03.** Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- 04.** Ne modifiez jamais le masque.

#### Pour le mettre :

- 01.** Tenez le masque par les lanières.
- 02.** Placez-le au niveau de votre bouche.
- 03.** Passez les lanières derrière les oreilles.
- 04.** Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

#### Lorsque vous le portez :

- 01.** Évitez de le toucher et de le déplacer.
- 02.** Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

#### Il faut changer le masque :

- 01.** Quand vous avez porté le masque 4h.
- 02.** Quand vous souhaitez boire ou manger.
- 03.** Quand il devient difficile de respirer.
- 04.** Si le masque s'humidifie.
- 05.** Si le masque est endommagé.

#### Pour l'enlever :

- 01.** Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- 02.** Détachez les lanières et retirez le masque de votre visage.
- 03.** En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
- 04.** Si le masque est usé, jetez-le à la poubelle.
- 05.** Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

## COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

### Avant ouverture :

**01.** Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

### Pour le lavage :

**01.** Lavez le masque à l'eau savonneuse à 60°C.

**02.** Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

**03.** Ce masque et les filtres ont été testé pour 10 lavages. Après 10 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.

**04.** Lorsque le lavage est terminée, remettez-le en forme en l'aplatissant sans forcer.

### Après le lavage :

**01.** Faites sécher le masque dans son intégralité (les filtres doivent également être totalement sèc

**02.** Pour cela, vous pouvez: utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque et les filtres à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.

**03.** Repassez votre masque, et (ou) le filtre à la vapeur en mode synthétique.

**04.** Dès que le masque, et (ou) le filtre sont sec, stockez-le pour le conserver dans l'emballage propre.

## SÉCURITÉ

**01.** Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90% pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.

**02.** La respirabilité du masque a été mesurée à  $> 96 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$  et doit permettre son port pour une durée de 4h.

## AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

## DÉCOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques pouvant être lavés, voici un tableau pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :


